




Proti-Flex

optimaal tijdelijk
draagcomfort voor iedereen

DE PERFECTE TIJDELIJKE OPLOSSING

Als bij uw patiënt, ten gevolge van letsel/ziekte/levensstijl, tanden en kiezen verloren gaan, brengt dit veranderingen met zich mee. Niet alleen het aanzicht van uw patiënt verandert, ook kunnen er nadelige gevolgen ontstaan voor de mondgezondheid en het kauwvermogen.

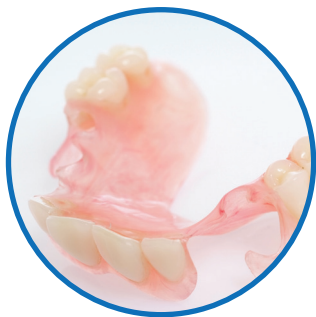

U stelt een individueel behandelplan op aan de hand van de unieke gebitskenmerken, specifieke wensen en het persoonlijk budget van uw patiënt. Totdat de definitieve behandeling* kan plaatsvinden is het van belang dat de omliggende elementen niet gaan verschuiven, de kauwfunctie intact blijft en de esthetiek is gewaarborgd.

Proti-Flex, onze TCS® flexibele partiële prothese is de ideale tijdelijke voorziening gedurende deze tussenliggende periode.

WAAROM PROTI-FLEX?

Proti-Flex is ontwikkeld als alternatief voor de kunststof partiële prothese. Dankzij het gebruik van TCS®, een nylon kunststof, is de Proti-Flex sterk, duurzaam en flexibel.

Het materiaal is dun, licht en zo goed als onbreekbaar. Dit draagt bij aan het draagcomfort voor uw patiënt. In plaats van metalen klammers gebruiken wij tandvleeskleurige klammers in TCS®, mogelijk in diverse tinten:



Light
Pink



Pink



Pink
Brown



Brown

Omdat TCS® zoveel voordelen heeft, gebruiken wij dit materiaal ook voor cosmetische doeleinden; om het blootliggende gedeelte van de wortels te camoufleren bij (lange tanden), in combinatie met CrCo framework bij vrijeindigende situaties en en als tijdelijke vervanging voor een implantaatkroon.

*Bekijk onze website





3. VERSCHILLENDE SOORTEN PROTI-FLEX PROTHESES:

- **Unilaterale prothese**
- **Bilaterale prothese**
- **Combinatie met frame**

EERSTE PLAATSING

Dompel voor het plaatsen de Proti-Flex prothese gedurende 30 tot 60 seconden onder in kraanwater van +/- 38 graden. Het materiaal wordt iets soepeler, waardoor de prothese makkelijk de juiste vorm aanneemt en voor de patiënt prettig aanvoelt.

HET REINIGEN VAN PROTI-FLEX

De prothese dient dagelijks gereinigd te worden met behulp van een (zachte) tandenborstel, water en (groene) zeep. GEEN agressieve reinigingsmiddelen (prothese-reinigers)





PROTI-FLEX

- Duurzaam & sterk
- Bijna onbreekbaar
- Metaalvrij (TCS®)
- Zeer goede retentie & stabiliteit
- Ideaal als tijdelijke voorziening

