

Geleitsstraße 14 - 60599 Frankfurt a. M.

www.protilab.de

Hotline 0800 755 7000 - kontakt@protilab.de

Protilab easyfit®-Veneers werden hergestellt aus e.max Press, einer Lithium-Disilikat-Glaskeramik für die Press-Technik. Perfekt für Zahnärzte die einfache Lösungen bevorzugen. Sie korrigieren schnell und einfach leichte Zahnfehlstellungen und Farbunterschiede. Dank ihrer geringen Stärke, kann ein Beschleifen der Zähne vermieden werden. Es ist eine effiziente und sichere Lösung.

Sie lassen sich sehr einfach einsetzen, es sind nur 2 oder 3 Termine erforderlich.

Sie sind widerstandsfähig, über Jahre hinweg stabil und behalten ihren natürlichen Farbton.

*easyfit® nur Protilab International



ÄSTHETIK

- Leichte Zahnfehlstellungen sowie Verfärbungen korrigieren.
- Farbstabilität.



TECHNIK

- Extrem dünne Veneers (bis 0,3 mm) Vermeidung des Beschleifen der Zähne (oder mit einer minimalinvasiven Präparation).
- Sehr abriebfest, stabile und passgenaue.
- Naturgetreue, harmonische Ergebnisse.
- bemerkenswerte Festigkeit von 470 MPa.



BEFESTIGUNG

- Perfekt in Verbindung mit Variolink® Esthetic bonding.
- Fünf Transluzenzstufen und zusätzliche Impuls-Rohlinge für maximale Flexibilität.
- Einfache Beseitigung von Überschüssen.
- Adhäsive, selbstadhäsive oder konventionelle Befestigung.



PROTILAB MATERIALIEN

- **Press-Keramik:** IPS e.max® Press - Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein



HINWEIS ZUM GEBRAUCH

OPTIMALE VORBEREITUNG

- Im Falle eines Diastemas ist es notwendig, den approximalen Bereich anzupassen, um das Einsetzen der Veneers zu erleichtern.
- Im Falle von Unebenheiten auf der Zahnoberfläche und/oder im Inzisalbereich wird empfohlen, diese bereits bei der Präparation anzupassen.
- Bei Unterkieferzähnen müssen Sie die Inzisalkante um etwa 0,5 mm reduzieren.

DER ABRUCK

- Digitaler Scan, Silikone und Elastomere (keine Alginate).
- Für einen besseren Sitz der Verblendungen wird empfohlen, immer Fäden oder ein geeignetes Ersatzmaterial zu verwenden, um eine perfekte Abformung der Präparationsgrenze zu gewährleisten. Wir empfehlen eine Abformung aus dünnfließendem und mittelviskosem Silikon.

FARBNAHME

- Nehmen Sie bitte beide Farben bei der Farbauswahl (Stumpffarbe und gewünschten Zahnfarbe).

BEFESTIGUNG

- Variolink® Esthetic bonding.

MEINUNG VON ROSARIO, ZAHNTECHNISCHER LEITER

„Für mich ist es die perfekte Lösung, um Ästhetik und Schnelligkeit zu verbinden! Ich empfehle dem Patienten im ersten Schritt ein Wax-Up um vorab einen ersten Eindruck der geplanten Arbeit zu vermitteln. 2 oder 3 Termine sind ausreichend. Das Ergebnis ist erstaunlich!“

