



## Pflegetipps für Zahnersatz und sonstige Hinweise

### 1. Hinweise zum festsitzenden Zahnersatz

a. Pflegetipps: Mit Zahnbürste und Zahncreme, wie die natürlichen Zähne. Für ältere und motorisch eingeschränkte Menschen hat sich eine Nagelbürste mit Naturhaarborsten, wegen der besseren Griffigkeit, als gute Alternative bewährt.

### 2. Hinweise zum herausnehmbaren Zahnersatz

a. Pflegetipps: Mit Zahnbürste und Zahncreme, wie die natürlichen Zähne. Für ältere und motorisch eingeschränkte Menschen hat sich eine Nagelbürste mit Naturhaarborsten, wegen der besseren Griffigkeit, als gute Alternative bewährt.

b. Reinigung: Ein Ultraschallgerät mit mindestens 38 kHz, warmes Wasser und ein handelsübliches Spülmittel. Hartnäckiger Zahnstein wird hervorragend durch die Zugabe von Haushaltsessig beseitigt.

c. Verwendung sonstiger Reinigungsmittel: Vor der Verwendung von handelsüblichen Reinigungstabletten oder -tabs raten wir eindringlich ab. Dem Kunststoff werden durch diese Reinigungstabletten die Weichmacher und die Farbe entzogen. Dadurch wird der Kunststoff spröde, die Bruchgefahr erhöht sich und der rosa Farbton verwandelt sich in ein hässliches Weiß.

### 3. Hinweise an den Zahnarzt

a. Kontraindikationen: Diese werden bereits im Vorfeld über den Auftragszettel abgefragt.

b. Sonstige Beschränkungen Vorsichtsmaßnahmen oder Warnungen: Vorsichtiger Umgang und Biß entsprechend den natürlichen Zähnen.

c. Unsere Produkte werden nicht steril geliefert. Bitte desinfizieren Sie diese vor dem Einsetzen.