



## WAS SIND VENEERS?



Veneers sind Verblendschalen aus Keramik. Sie sind hauchdünn (bis zu 0,3mm) und kommen meistens im Frontzahnbereich zum Einsatz. Zur Fixierung der Veneers wird ein Spezialkleber verwendet, der die Veneers auf der Oberfläche der natürlichen Zähne befestigt. Insbesondere geeignet sind Veneers bei kleineren Unregelmäßigkeiten am Zahn. Als Alternative zum Bleaching kommen Veneers auch bei dauerhaften Verfärbungen der Zähne zum Einsatz. Somit kann ein natürliches Weiß und eine ästhetische Ebenmäßigkeit erzielt werden.

## WARUM SIND VENEERS EINE GUTE LÖSUNG?

Veneers bieten eine Möglichkeit, Unregelmäßigkeiten oder Farbänderungen am Zahn langfristig und schonend zu korrigieren. Für viele Menschen sind diese Veränderungen am Zahn nicht nur nicht schön. Vor größeren Eingriffen schrecken wir alle, aus nachvollziehbaren Gründen, zurück. Eine Versorgung mit Veneers findet mit geringstem Aufwand und Eingriff am vorhandenen Zahn statt. Maximal einen Millimeter stark, machen die Verblendschalen störende Mängel unsichtbar. Das können über lange Jahre entstandenen Unebenheiten, Verfärbungen, kleinen Lücken, Fehlstellungen oder eine unschöne Zahnform sein. Auch abgeplatzte Zahnteile - beispielweise aufgrund eines Unfalls - sind mit Hilfe von Veneers meist elegant rekonstruierbar. Dabei wird keine wertvolle Zahnschicht geschädigt, wie es bei anderen Behandlungsalternativen der Fall wäre.



## WIE LÄUFT EINE VERSORGUNG MIT VENEERS BEI PROTILABVEIGENTLICH AB?



### Untersuchung und Vorbereitung

Sollten Sie sich dafür entschlossen haben, ihr Lächeln mit Hilfe von Veneers zu verschönern, wird Ihr Zahnarzt Sie über die bestehenden Möglichkeiten beraten. Im Rahmen dieser Beratung werden Sie einen Kostenvoranschlag erhalten, der auch die Kosten von Protilab enthalten wird. Ist dieser von Ihrer Seite bestätigt, geht es an die Vorbereitung. Der erste Schritt ist zumeist eine professionelle Zahnreinigung.

Ebenso wird Ihr Zahnarzt auf kariöse Stellen achten.

### Präparation

Der Zahn, der mit einem Veneer versorgt werden soll, wird nur leicht beschliffen. Nach Fertigstellung soll das Ergebnis gerade im Frontzahnbereich nicht unnatürlich dick wirken. In aller Regel entstehen

Ihnen hierbei keine Schmerzen, da nur minimale Zahnschicht entfernt wird.

### Abformung und Herstellung

Nach der Vorbereitung wird Ihr Zahnarzt eine Abformung vornehmen. Danach tritt er mit dem persönlichen zahntechnischen Berater bei Protilab in Kontakt. Im nächsten Schritt wird bei Protilab eine passgenaue Verblendschale produziert. Die Zeit bis zum endgültigen Einsetzen wird Ihr Zahnarzt mit einem Provisorium überbrücken.


### Ankleben

Die Fixierung des endgültigen Veneers benötigt pro Zahn ca. 20 Minuten. Ihr Zahnarzt wird die Passgenauigkeit und den genauen Sitz des Veneers sowie den Abschluss der Arbeit besprechen.

## WAS KOSTEN VENEERS BEI PROTILAB?

Vergleicht man Preise verschiedener Zahnarztpraxen, können die Kosten für Veneers sehr unterschiedlich ausfallen. Je nach nötigen Vorarbeiten, Material, Patientenwunsch und individuell angesetztem Zahnarzt Honorar kann die Summe leicht 1.500 Euro pro Zahn betragen.

Bei Protilab legen wir Wert darauf, dass Patienten fairen Zahnersatz erhalten können. Das bedeutet für uns: Ein sehr gutes Produkt zu einem sehr guten Preis, sodass Ihr Lächeln bezahlbar ist. Ein easyfit®-Veneer e-max kostet daher bei Protilab 119€\* pro Zahn.

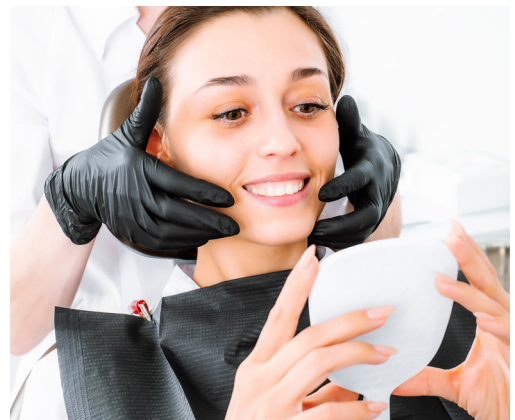

\*Stand: Mai 2022