



## Advies en informatie gebitsverzorging

### VAN BELANG VOOR PATIËNTEN

#### 1. Informatie gebitsverzorging bij kronen en bruggen

a. Mondverzorging: Poets met tandenborstel en tandpasta, zoals bij natuurlijke tanden. Voor mensen met een motorische beperking, die moeite hebben om de gewone tandenborstel te hanteren, is een goed alternatief een nagelborstel met natuurlijk haar voor een betere grip.

#### 2. Informatie gebitsverzorging bij uitneembare prothese

a. Mondverzorging: Poets met tandenborstel en tandpasta, zoals bij natuurlijke tanden. Voor mensen met een motorische beperking, die moeite hebben om de gewone tandenborstel te hanteren, is een goed alternatief een nagelborstel met natuurlijk haar voor een betere grip.

b. Reiniging prothese: Gebruik een ultrasoon apparaat met minimaal 38 kHz, warm water en vloeibare (groene) zeep. Hardnekkig tandsteen kan verwijderd worden met behulp van huishoudazijn.

c. Gebruik van reinigingstabletten raden wij u ten zeerste af. Het kunststof materiaal kan zacht en week worden, waardoor de kans op breuk toeneemt en de natuurlijke roze tint veranderd in lelijk wit.

### VAN BELANG VOOR TANDARTSEN:

#### 3. Aantekeningen voor de tandarts

a. Contra-indicaties: Gaarne vermelden op de opdrachtbon

b. Andere beperkingen Voorzorgsmaatregelen of waarschuwingen : U dient voorzichtig met het kunstgebit om te gaan, zoals met natuurlijke tanden.

c. Onze producten worden niet steriel geleverd. Desinfecteer ze voordat u deze in de mond plaatst.

**Hotline**

**0800-0525**

[contact@protilab.nl](mailto:contact@protilab.nl)

Kingsfordweg 151 - 1043GR AMSTERDAM

[www.protilab.com](http://www.protilab.com)