

ULTRA-DUNNE EASYFIT® FACINGS

Protilab Easyfit® facings zijn gemaakt van e-max® Press, een lithiumdisilicaat glaskeramiek, door middel van perstechniek vervaardigd. Een perfecte, eenvoudige oplossing om kleine tandafwijkingen en kleurverschillen te corrigeren. Omdat de facings maar 0,3mm dun zijn, kunnen de natuurlijke elementen grotendeels worden behouden. Ze zijn veerkrachtig en behouden jarenlang kleur.



ESTHETIEK

- Een perfecte mimicry dankzij een onzichtbare cervicale rand door afwezigheid van metaal.
- E.max® is een sterk doorschijnend glaskeramiek, wat bijdraagt aan een esthetische natuurlijke uitstraling.



VOORDELEN

- Kleurstabiliteit, mogelijk in 5 translucente kleuren.
- Extreem dun (tot 0,3 mm).
- Zeer slijtvast.
- De natuurlijke elementen kunnen grotendeels worden behouden.



INDICATIE

- Correctie van kleine tandafwijkingen.
- Verfraaien van kleurverschillen.



INFORMATIE

MATERIAAL

- Perskeramiek: IPS e.max® Press - Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein

TECHNIEK

- Opmerkelijke sterkte van 470 MPa.



PREPARATIE EN PLAATSING

PREPARATIE

- In het geval van een diasteem is het nodig om het proximale gebied aan te passen aan het begin van de preparatie.
- Bij oneffenheden op het tandoppervlak en/of in het incisale gebied is het aan te bevelen deze te gebruiken en aan te passen tijdens het prepareren.
- Bij elementen in de onderkaak moet u de incisale rand ongeveer 0,5 mm verkleinen.
- Voor een betere pasvorm van de facing raden we altijd aan om een retractiedraad te gebruiken.
- Gebruik het door de fabrikant aanbevolen materiaal om een perfecte afdruk te kunnen maken van de preparatie.
- Om de esthetiek en kwaliteit te kunnen waarborgen adviseren wij een afdruk te maken met een dunvloeiende en gemiddelde viscositeit siliconen materiaal.
- Kleurbepaling van zowel de stomp na prepareren als de uiteindelijk gewenste kleur van de facing.

AFDRUKMATERIAAL

- Digitaal, siliconen en elastomeren (geen alginaten).

PLAATSING

- Variolink® Esthetische verlijming.



VOLGENS ROSARIO, ONZE ERVAREN TANDTECHNICUS

Voor mij is het de perfecte oplossing om esthetiek en snelheid te combineren! Als eerste stap raad ik een wax-up aan om de patiënt een eerste indruk te geven van de mogelijkheden. Het resultaat is verbluffend!

