

Onze metalen frameprothese is een eenvoudige, functionele en relatief

goedkope oplossing bij verloren tanden en/of kiezen. Volledige of gedeeltelijke frameprotheses worden aangeraden om de totale of gedeeltelijke edentulisme te compenseren, zodat de fonetiek, het kauwvermogen en de esthetiek verbeterd. De metalen ankers worden naar de vorm van de elementen ontworpen waardoor voedsel zich minder makkelijk vasthecht, de kans op beschadiging van de natuurlijke elementen is minimaal en er is minder kans op irritatie.

Voor patiënten waarbij de volledige frameprothese instabiel in de mond is, kunnen we de frameprothese op implantaten vervaardigen.



ESTHETIEK

- Als alternatief voor de zichtbare ankers bieden wij ook tandkleurige, kunststof ankers voor de esthetiek. Deze zijn leverbaar in de meest gangbare kleuren van Vita Classic.



VOORDELEN

- Keuze uit diverse metalen; CoCr en Vitalium 2000.
- Bijplaatsen van elementen mogelijk.
- Kleurstabiliteit.



INDICATIE

- Alle gevallen waarbij functionele eisen primeren boven de esthetische eisen.
- Praktische, relatief goedkope oplossing voor patiënten zonder metaalallergie.



INFORMATIE

Materiaal:

- **CoCr:** Wironit- BEGO - CE0197 - Germany
- **Kunststof elementen:** Ivostar, Gnathostar – Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein.
- **kunststof** Stellan QC20 199 Pink - Dentsply - Classe 1 - USA.
- **Flexibele nylon:** Lucitone 199 - Dentsply - CE0088 - USA

Techniek:

- Vervaardigd met behulp van CAD-CAM.



PREPARATIE

PARTIËLE FRAMEPROTHESE:

- Primaire afdruk in alginaat, daarna,
- Secundaire afdruk met individuele lepel en beetplaat met waswal.

VOLLEDIGE FRAMEPROTHESE:

- Primaire afdruk in alginaat en tussenbeet, daarna,
- Secundaire afdruk met individuele lepel met Permlastic of zinkoxide pasta.
- Digitale afdruk is mogelijk. Het is aan te raden om deze aan te vullen met een traditionele afdruk, zodat de essentiële zachte delen in de mond dan perfect kunnen worden weergegeven en zodoende een perfecte pasvorm heeft.

AFDRUKMATERIAAL:

- Digitaal, siliconen en elastomeren (geen alginaten).

VOLGENS ONZE ERVAREN TANDTECHNICUS EVA

Frameprotheses worden gemaakt van hoogwaardige materialen. leiden tot een optimaal resultaat. Met behulp van een goede samenwerking vervaardigen wij de best mogelijke oplossing voor uw patiënt.

